

## Manual de utilização do teste Hélix




1. Retire a tampa da Hélix .




7. Retire a tira de teste da tampa e verifique.




2. Pegue numa tira de teste e dobre -o ao meio com a tinta no interior.

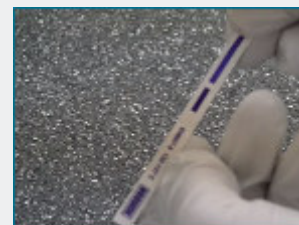

8. Uma mudança de cor uniforme de amarelo para azul indica que todo o ar foi removido durante a fase de vácuo do ciclo.

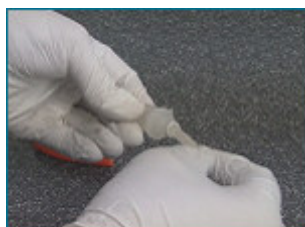

3. Coloque a tira de teste na tampa em primeiro lugar.

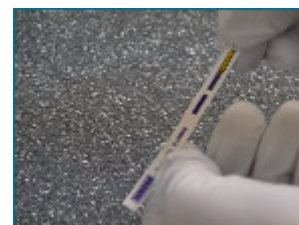


9. Se a cor original permanece visível e a mudança de cor de amarelo para azul não for uniforme, isto indica que a fase de vácuo não foi capaz de remover todo o ar do Hélix.




4. Colocar a tampa no dispositivo do Hélix .



5. Coloque o Hélix dentro da autoclave pré-aquecido.

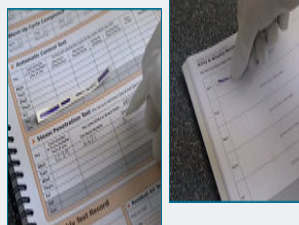

10/11. Faça o registo e anexe num livro de registos como mais uma prova do resultado do teste.

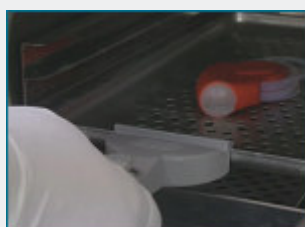

6. Quando o ciclo terminar, remova cuidadosamente o Hélix da câmara.